

INSTRUÇÃO DE USO

KIT CÂNULA DISCO-BLOCK - KIT CÂNULA PARA DISCOGRAFIA COM MANÔMETRO ANALÓGICO E BLOQUEIO DUPLO

RENOVA
M E D I C A L

FORMAS DE APRESENTAÇÃO:

DISCO-BLOCK-1 - Kit Cânula para Discografia com Manômetro Analógico e Bloqueio Duplo; Kit Composto por:

- 1 Unidade de insuflador com manômetro analógico 20 ml;
- 1 Unidade de cânula introdutora para detecção da impedância 150mm x 22G;
- 2 Unidades de cânula introdutora 100mm x 18G;
- 1 torneira de via tripla com conector luer lock;
- 2 adaptadores luer lock; 1 extensor de via dupla;

DISCO-BLOCK-2 - Kit Cânula para Discografia com Manômetro Analógico e Bloqueio Duplo; Kit Composto por:

- 1 Unidade de insuflador manômetro analógico 20 ml;
- 1 Unidade de cânula introdutora para detecção da impedância 150mm x 22G;
- 2 Unidades de cânula introdutora 100mm x 20G;
- 1 torneira de via tripla com conector luer lock;
- 2 adaptadores luer lock; 1 extensor de via dupla;

DISCO-BLOCK-3 - Kit Cânula para Discografia com Manômetro Analógico e Bloqueio Duplo; Kit Composto por:

- 1 Unidade de insuflador com manômetro analógico 20 ml;
- 1 Unidade de cânula introdutora para detecção da impedância 150mm x 22G;
- 2 Unidades de cânula introdutora 100mm x 22G;
- 1 torneira de via tripla com conector luer lock;
- 2 adaptadores luer lock; 1 extensor de via dupla;

INDICAÇÃO DE USO:

O Kit Disco-Block foi desenvolvido para ser utilizado por profissional médico com a finalidade de diagnóstico e bloqueio de nervos periféricos em um mesmo produto.

O dispositivo permite ao médico medir a pressão interna do disco através do manômetro, que simula a dor irradiada no dermatomo avaliado, ocasionada pelo aumento da pressão. É um método capaz de diferenciar discos degenerados sintomáticos dos assintomáticos, além de determinar o grau de degeneração e sua morfologia. O acesso é feito por uma cânula de 22 gauge, que minimiza o potencial de danos aos tecidos.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

As cânulas de bloqueio têm como princípio de funcionamento o posicionamento manual no local doloroso para a realização do procedimento de bloqueio periférico, onde o médico consegue avaliar as condições para realizar o bloqueio através das informações fornecidas no manômetro (PSI X fármaco). Para realizar a discografia, primeiro é detectada a impedância para ter a confirmação do tecido acessado.

O princípio de funcionamento da discografia provocativa é pressão manual no disco que simula a pressão da coluna e, desta forma, é possível analisar a degeneração do disco.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O armazenamento do produto, deve seguir os parâmetros a seguir: - Temperatura: até 30°C. Proteger contra incidência direta de raios solares. O transporte do produto deve proteger contra incidência direta de raios solares.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Leia atentamente ao manual de instruções antes de iniciar o uso do aparelho.

Não entorte as cânulas, pois o isolamento pode ser danificado;

Não utilizar se o lacre estiver violado;

O produto deve ser utilizado somente em hospitais ou clínicas, em condições assépticas, e manipuladas por médicos devidamente habilitados e treinados para execução do procedimento.

Não utilize o instrumento se:

Apresentar quebras, rachas, dobras ou falhas visíveis. As ações do produto se tornarem anormais.

O fabricante recomenda uso único.

Fabricado por:

Renova Medical Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA

Rua Angela Berbel Pagano, 336 – Jd. Alvorada

E-mail: rt@renovamedical.com.br

CNPJ: 31.047.312/0001-84

Responsável Técnico: Nathalia Lopes Schiavotelo COREN-SP 566.914

Data: 25/06/2024 Versão 01

RxOnly	Aviso: O uso e venda deste produto é restrito à profissionais da área médica.
STERILE EO	Estéril; Método de esterilização: óxido de etileno.
	Uso único
	Aviso; Consulte Instruções de Uso
	Deixe fora da luz solar
	Não use se a embalagem estiver violada