

INSTRUÇÃO DE USO

BLOCK-2 - KIT CANULA PARA BLOQUEIO DE NERVOS

ANVISA - 81747770008

RENOVA
MEDICAL

FORMAS DE APRESENTAÇÃO:

2BLK0502210S Kit Canula 50 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta reta
2BLK1001810C Kit Canula 100 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta curva
2BLK1001810S Kit Canula 100 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta reta
2BLK1002010C Kit Canula 100 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta curva
2BLK1002010CH Kit Canula 100 mm de comprimento, 20 gauge, 10mm de ponta curva
2BLK1002010S Kit Canula 100 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta reta
2BLK10021S Kit Canula 100 mm de comprimento, 21 gauge
2BLK1002205S Kit Canula 100 mm de comprimento, 22 gauge, 05 mm de ponta reta
2BLK1002210C Kit Canula 100 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta curva
2BLK1002210S Kit Canula 100 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta reta
2BLK15018S Kit Canula 150 mm de comprimento, 18 gauge.
2BLK1501810C Kit Canula 150 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta curva
2BLK1501810S Kit Canula 150 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta reta
2BLK1502005S Kit Canula 150 mm de comprimento, 20 gauge, 05 mm de ponta reta
2BLK1502010C Kit Canula 150 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta curva
2BLK1502010S Kit Canula 150 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta reta
2BLK1502210C Kit Canula 150 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta curva
2BLK1502210S Kit Canula 150 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta reta

KIT COM 02 CÂNULAS + 02 INTRODUTORES DE FÁRMACO + 02 EXTENSORES.

INDICAÇÃO DE USO:

A cânula descartável para bloqueio destina-se a auxiliar o cirurgião no bloqueio da dor no local desejado pelo profissional.

O objetivo do procedimento é o alívio temporário dos sintomas, embora, em alguns casos, esse alívio possa ser bastante duradouro. O produto permite a realização de um procedimento minimamente invasivo com fácil manipulação das cânulas e segurança.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

As cânulas são produtos invasivos cirurgicamente de uso transitório (menos de 60 min).

É uma ferramenta para tratamento de nervos periféricos com a finalidade de bloquear a dor, fornecendo preparação para o procedimento cirúrgico ou analgesia como tratamento da dor crônica. Este procedimento é realizado sem prejuízo às funções vitais do paciente.

MODO DE USO DO PRODUTO:

1. Realizar inspeção visual para certificar-se de que a embalagem não está danificada;
2. Remover a cânula da embalagem estéril em ambiente limpo utilizando técnicas assépticas;
3. Certificar-se de que a ponta da cânula está íntegra;
4. Posicionar o paciente;
5. Inserir a cânula com auxílio de Fluoroscopia;
6. Encaixar o introdutor e o extensor.
7. Injetar a solução analgésica padronizada através do introdutor;
8. Findo o procedimento, descaracterizar e descartar o material em local apropriado seguindo os regulamentos aplicáveis ao descarte de materiais perfuro-cortantes e contaminados do hospital.

PRODUTO ESTÉRIL E RECOMENDA-SE USO ÚNICO.

O PRODUTO NÃO É ACOMPANHADO DE NENHUM MEDICAMENTO OU FÁRMACO.

As cânulas são ESTÉREIS e de recomenda-se USO ÚNICO e possuem a mesma composição, a mesma área de aplicação e finalidade de uso. Diferenciam-se apenas pelo seu diâmetro e comprimento e pelo seu tipo de ponta.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O armazenamento do produto, deve seguir os parâmetros a seguir:

- Temperatura: até 30°C.
- Proteger contra incidência direta de raios solares.
- O transporte do produto, deve proteger contra incidência direta de raios solares.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:

Somente deverá ser utilizado por profissional médico devidamente habilitado e treinado para execução do procedimento.

O produto não acompanha nenhum material implantável e nenhum medicamento ou fármaco.

Para o descarte correto do material, seguir o protocolo de descarte de resíduos sólidos implantado pelo hospital. Descaracterizar o material antes de seu descarte.

REQUISITOS DE INFRA-ESTRUTURA:

Somente devem ser utilizadas em hospitais e clínicas em condições assépticas e manipuladas por médicos habilitados e treinados.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES:

Este produto não deve ser utilizado para outros fins exceto os declarados nas instruções de uso;

Não entorte a cânula, pois o isolamento pode ser danificado;

Não utilizar se for observado algum dano na cânula, ou se o lacre estiver violado;

Somente profissionais da saúde podem utilizar este produto. Antes da utilização, leia com atenção o manual do usuário; Não utilize o produto após a data de vencimento;

Antes de utilizar o produto, deve-se ler as instruções de uso;

Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, certifique-se de que todos os materiais encontram-se

disponíveis e esterilizados; Efetue o procedimento levando em consideração as técnicas assépticas;

Fabricado por:

Renova Medical Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA

Rua Angela Berbel Pagano, 336 – Jd. Alvorada

E-mail: rt@renovamedical.com.br

CNPJ: 31.047.312/0001-84

Responsável Técnico: Nathalia Lopes Schiavotelo COREN-SP 566.914

Data:25/06/2024 Versão 01

| | |
|---|--|
| RxOnly | Aviso: O uso e venda deste produto é restrito à profissionais da área médica. |
| STERILEEO | Estéril; Método de esterilização: óxido de etileno |
|  | Uso único |
|  | Aviso: Consulte Instruções de Uso |
|  | Deixe fora da luz solar |
|  | Não use se a embalagem estiver violada |