

INSTRUÇÃO DE USO

SPINEEDLE ESTÍM BLOCK 04 KIT CÂNULA PARA BLOQUEIO COM ESTÍMULO
ANVISA - 81747770015

RENOVA
MEDICAL

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

4SPND1002210S Kit Cânula 100 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta reta;
4SPND1002205S Kit Cânula 100 mm de comprimento, 22 gauge, 05 mm de ponta reta;
4SPND1002210C Kit Cânula 100 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta curva;
4SPND1502210S Kit Cânula 150 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta reta;
4SPND1502210C Kit Cânula 150 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta curva;
4SPND0502210S Kit Cânula 50 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta reta;
4SPND1002010S Kit Cânula 100 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta reta;
4SPND1002010C Kit Cânula 100 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta curva;
4SPND1502010S Kit Cânula 150 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta reta;
4SPND1502010C Kit Cânula 150 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta curva;
4SPND1502005S Kit Cânula 150 mm de comprimento, 20 gauge, 05 mm de ponta reta;
4SPND1001810S Kit Cânula 100 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta reta;
4SPND1001810C Kit Cânula 100 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta curva;
4SPND1501810S Kit Cânula 150 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta reta;
4SPND1002010CH Kit Cânula 100 mm de comprimento, 20 gauge, 10mm de ponta curva;
4SPND1501810C Kit Cânula 150 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta curva;
4SPND10021S Kit Cânula 100 mm de comprimento, 21 gauge;
4SPND15018S Kit Cânula 150 mm de comprimento, 18 gauge.

KIT COMPOSTO POR 04 CÂNULAS + 04 INTRODUTORES DE FÂRMACO + 04 EXTENSORES.

INDICAÇÃO DE USO:

A cânula descartável para bloqueio destina-se a auxiliar o cirurgião no bloqueio da dor no local desejado pelo profissional. O objetivo do procedimento é o alívio temporário dos sintomas, embora, em alguns casos, esse alívio possa ser bastante duradouro. O produto permite a realização de um procedimento minimamente invasivo com fácil manipulação das cânulas e segurança. As cânulas são produtos invasivos cirurgicamente de uso transitório (menos de 60 min). É uma ferramenta para tratamento de nervos periféricos com a finalidade de bloquear a dor fornecendo preparação para o procedimento cirúrgico ou analgesia como tratamento da dor crônica. Este procedimento é realizado sem prejuízo às funções vitais do paciente.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

Modo de uso do produto:

1. Realizar inspeção visual para certificar-se de que a embalagem não está danificada;
2. Remover a cânula da embalagem estéril em ambiente limpo utilizando técnicas assépticas;
3. Certificar-se de que a ponta da cânula está íntegra;
4. Posicionar o paciente;
5. Inserir a cânula com auxílio de Fluoroscopia;
6. Injetar a solução analgésica padronizada através da cânula;
7. Em caso de estimulação, inserir o eletrodo e programar a estimulação;
8. Findo o procedimento, descaracterizar e descartar o material em local apropriado seguindo os regulamentos aplicáveis ao descarte de materiais perfurocortantes e contaminados do hospital.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O armazenamento do produto, deve seguir os parâmetros a seguir:
- Temperatura: até 30°C. Proteger contra incidência direta de raios solares.
O transporte do produto deve proteger contra incidência direta de raios solares.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:

Somente deverá ser utilizado por profissional médico devidamente habilitado e treinado para execução do procedimento. Produto comercializado estéril. O produto não acompanha nenhum material implantável e nenhum medicamento ou fármaco. Para o descarte correto do material, seguir o protocolo de descarte de resíduos sólidos implantado pelo hospital. Descaracterizar o material antes de seu descarte.
Requisitos de infra estrutura:
Somente devem ser utilizadas em hospitais e clínicas em condições assépticas e manipuladas por médicos habilitados e treinados.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Este produto não deve ser utilizado para outros fins exceto os declarados nas instruções de uso;
Não entorte a cânula, pois o isolamento pode ser danificado;
Não utilizar se for observado algum dano na cânula, ou se o lacre estiver violado;
Somente profissionais da saúde podem utilizar este produto. Antes da utilização, leia com atenção o manual do usuário;
Produto estéril. Recomenda-se uso único. Proibido reprocessamento;
Não utilize o produto após a data de vencimento;
Antes de utilizar o produto, deve-se ler as instruções de uso;
Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, certifique-se de que todos os materiais encontram-se disponíveis e esterilizados; Efetue o procedimento levando em consideração as técnicas assépticas.

Fabricado por:

Renova Medical Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA
Rua Angela Berbel Pagano, 336 – Jd. Alvorada
E-mail: rt@renovamedical.com.br
CNPJ: 31.047.312/0001-84
Responsável Técnico: Nathalia Lopes Schiavotelo COREN-SP 566.914
Data: 25/06/2024 Versão 01

RxOnly	Aviso: O uso e venda deste produto é restrito à profissionais da área médica.
STERILE EO	Estéril; Método de esterilização: óxido de etileno
	Uso único
	Aviso; Consulte Instruções de Uso
	Deixe fora da luz solar
	Não use se a embalagem estiver violada