

# INSTRUÇÃO DE USO

## KIT CANULA PARA DISCOGRAFIA ANALÓGICA

ANVISA - 81747779002

**RENOVA**  
MEDICAL

### **FORMAS DE APRESENTAÇÃO:**

DISC-C - KIT CÂULA PARA DISCOGRAFIA  
ANALÓGICA; Composto por:  
Uma unidade de insuflador 20 ml  
Uma unidade de cânula 150mm x 18G

### **INDICAÇÃO DE USO:**

O Kit foi desenvolvido para ser utilizado por profissional médico com a finalidade de diagnóstico à partir do insuflador, e para controlar a pressão do mesmo no procedimento de discografia.  
O dispositivo permite ao médico medir a pressão interna do disco através do manômetro.  
A discografia provocativa simula a dor irradiada no dermatomo avaliado, ocasionada pelo aumento da pressão. Insuflador: É usada para simular a pressão.

### **PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:**

O Kit é um dispositivo desenvolvido para avaliar a pressão durante o procedimento de discografia, útil na visualização da posição da cânula no interior do disco e também para o diagnóstico de doenças degenerativas, utilizando o insuflador que simulará a pressão na parte interessada. O dispositivo indicará a pressão inicial do disco intervertebral do paciente assim que punccionado, dando parâmetros ao médico para iniciar o procedimento.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

O armazenamento do produto, deve seguir os parâmetros a seguir: - Temperatura: até 30°C.  
Proteger contra incidência direta de raios solares.  
O transporte do produto deve proteger contra incidência direta de raios solares.

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

Este produto não deve ser utilizado para outros fins exceto os declarados nas instruções de uso;  
Não utilizar se o lacre estiver violado;  
Somente profissionais da saúde podem utilizar este produto. Antes da utilização, leia com atenção o manual do usuário; Produto estéril. Fabricante recomenda Uso único.  
Não utilize o produto após a data de vencimento;  
Antes de utilizar o produto, deve-se ler as instruções de uso;  
Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, certifique-se de que todos os materiais encontram-se disponíveis e esterilizados;  
Efetue o procedimento levando em consideração as técnicas assépticas;

### **Fabricado por:**

Renova Medical Indústria e Comercio de Produtos  
Médicos Hospitalares LTDA  
Rua Angela Berbel Pagano, 336 – Jd. Alvorada  
E-mail: [rt@renovamedical.com.br](mailto:rt@renovamedical.com.br)  
CNPJ: 31.047.312/0001-84  
Responsável Técnico: Nathalia Lopes Schiavotelo  
COREN-SP 566.914  
Data:25/06/2024 Versão 01

RxOnly	Aviso: O uso e venda deste produto é restrito à profissionais da área médica.
STERILE EO	Estéril; Método de esterilização: óxido de etileno
	Uso único
	Aviso: Consulte Instruções de Uso
	Deixe fora da luz solar
	Não use se a embalagem estiver violada

