

INSTRUÇÃO DE USO

KIT CÂNULA DE BLOQUEIO PARA JOELHO E EXTREMIDADES

ANVISA - 81747779003

RENOVA
MEDICAL

FORMAS DE APRESENTAÇÃO:

JLO1002210S-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 100 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta reta;
JLO1002205S-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 100 mm de comprimento, 22 gauge, 05 mm de ponta reta;
JLO1002210C-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 100 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta curva;
JLO1502210S-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 150 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta reta;
JLO1502210C-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 150 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta curva;
JLO0502210S-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 50 mm de comprimento, 22 gauge, 10 mm de ponta reta;
JLO1002010S-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 100 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta reta;
JLO1002010C-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 100 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta curva;
JLO1502010S-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 150 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta reta;
JLO1502010C-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 150 mm de comprimento, 20 gauge, 10 mm de ponta curva;
JLO1001810S-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 100 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta reta;
JLO1001810C-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 100 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta curva;
JLO1501810S-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 150 mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta reta;
JLO10020CH-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 100 mm de comprimento, 20 Gauge, 10mm ponta chanfrada; JLO1501810C-BLK Kit Cânula para bloqueio de joelho e extremidades 150mm de comprimento, 18 gauge, 10 mm de ponta curva.

KIT COMPOSTOS POR 01 CÂBULA

INDICAÇÃO DE USO:

A cânula descartável para bloqueio destina-se a auxiliar o cirurgião no bloqueio da dor nas articulações do joelho e extremidades.

O objetivo do procedimento é o alívio temporário dos sintomas, embora, em alguns casos, esse alívio possa ser bastante duradouro. O produto permite a realização de um procedimento minimamente invasivo com fácil manipulação das cânulas e segurança.

O procedimento busca o bloqueio da dor crônica no ramo genicular superolateral do vasto lateral; no ramo genicular superomedial, no vasto medial e o ramo genômico inferomedial do nervo safeno.

Devido às inervações variadas desses nervos, o bloqueio se faz necessário para assegurar o tratamento da dor completo de cada um destes três nervos, separadamente, como condição de extrema importância para o sucesso do tratamento proposto. Além do joelho esse kit também é indicado para bloqueio de extremidades.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

As cânulas são produtos invasivos cirurgicamente de uso transitório (menos de 60 min).

É uma ferramenta para tratamento de nervos periféricos com a finalidade de bloquear a dor fornecendo preparação para o procedimento cirúrgico ou analgesia como tratamento da dor crônica. Este procedimento é realizado sem prejuízo às funções vitais do paciente.

Modo de uso do produto:

1. Realizar inspeção visual para certificar-se de que a embalagem não está danificada;
2. Remover a cânula da embalagem estéril em ambiente limpo utilizando técnicas assépticas;
3. Certificar-se de que a ponta da cânula está íntegra;
4. Posicionar o paciente;
5. Inserir a cânula;
6. Injetar a solução analgésica padronizada através da cânula;
7. Em caso de estimulação, inserir o eletrodo e programar a estimulação;
8. Findo o procedimento, descaracterizar e descartar o material em local apropriado seguindo os regulamentos aplicáveis ao descarte de materiais perfuro-cortantes e contaminados do hospital.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O armazenamento e transporte do produto, deve seguir os parâmetros a seguir: Proteger contra incidência direta de raios solares.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:

Descarte: o produto deve ser adequadamente descartado pela instituição hospitalar. Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico devem assegurar a completa descaracterização do mesmo, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização.

A descaracterização do produto é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como, métodos e procedimentos utilizados. Os produtos médicos devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, seu uso indevido. O descarte deverá seguir as normas estabelecidas pela RDC N° 306 (07/12/2004).

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Este produto não deve ser utilizado para outros fins exceto os declarados nas instruções de uso;
Não entorte a cânula, pois o isolamento pode ser danificado;
Não utilizar se for observado algum dano na cânula, ou se o lacre estiver violado;
Somente profissionais da saúde podem utilizar este produto. Antes da utilização, leia com atenção o manual do usuário; Produto estéril. Proibido reprocessamento;

Não utilize o produto após a data de vencimento;
Antes de utilizar o produto, deve-se ler as instruções de uso;
Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, certifique-se de que todos os materiais encontram-se disponíveis e esterilizados; Efetue o procedimento levando em consideração as técnicas assépticas;

Fabricado por:

Renova Medical Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA

Rua Angela Berbel Pagano, 336 – Jd. Alvorada

E-mail: rt@renovamedical.com.br

CNPJ: 31.047.312/0001-84

Responsável Técnico: Nathalia Lopes Schiavotelo COREN-SP 566.914

Data:25/06/2024 Versão 01

RxOnly	Aviso: O uso e venda deste produto é restrito à profissionais da área médica.
STERILE EO	Esteril: Método de esterilização: óxido de etileno
	Uso único
	Aviso: Consulte Instruções de Uso
	Deixe fora da luz solar
	Não use se a embalagem estiver violada