

DOUBLE ENDO BLOCK STIM KIT CÂNULA PARA BLOQUEIO DE NERVOS COM ESTÍMULO

REGISTRO ANVISA Nº 81747779012

FORMAS DE APRESENTAÇÃO:

O KIT É COMPOSTO POR DUAS CÂNULAS DE BLOQUEIO COM ESTÍMULO, DOIS INTRODUTORES DE FÁRMACO E DOIS EXTENSORES.

1002210S-EDBE2 KIT CÂNULA 100 MM DE COMPRIMENTO, 22 GAUGE, 10 MM DE PONTA RETA;
1002205S-EDBE2 KIT CÂNULA 100 MM DE COMPRIMENTO, 22 GAUGE, 05 MM DE PONTA RETA;
1002210C-EDBE2 KIT CÂNULA 100 MM DE COMPRIMENTO, 22 GAUGE, 10 MM DE PONTA CURVA;
1502210S-EDBE2 KIT CÂNULA 150 MM DE COMPRIMENTO, 22 GAUGE, 10 MM DE PONTA RETA;
1502210C-EDBE2 KIT CÂNULA 150 MM DE COMPRIMENTO, 22 GAUGE, 10 MM DE PONTA CURVA;
0502210S-EDBE2 KIT CÂNULA 50 MM DE COMPRIMENTO, 22 GAUGE, 10 MM DE PONTA RETA;
1002010S-EDBE2 KIT CÂNULA 100 MM DE COMPRIMENTO, 20 GAUGE, 10 MM DE PONTA RETA;
1002010C-EDBE2 KIT CÂNULA 100 MM DE COMPRIMENTO, 20 GAUGE, 10 MM DE PONTA CURVA;
1502010S-EDBE2 KIT CÂNULA 150 MM DE COMPRIMENTO, 20 GAUGE, 10 MM DE PONTA RETA;
1502010C-EDBE2 KIT CÂNULA 150 MM DE COMPRIMENTO, 20 GAUGE, 10 MM DE PONTA CURVA;
1001810S-EDBE2 KIT CÂNULA 100 MM DE COMPRIMENTO, 18 GAUGE, 10 MM DE PONTA RETA;
1001810C-EDBE2 KIT CÂNULA 100 MM DE COMPRIMENTO, 18 GAUGE, 10 MM DE PONTA CURVA;
1501810S-EDBE2 KIT CÂNULA 150 MM DE COMPRIMENTO, 18 GAUGE, 10 MM DE PONTA RETA;
10020CH-EDBE2 KIT CÂNULA 100 MM DE COMPRIMENTO, 20 GAUGE, 10MM PONTA CHANFRADA;
1501810C-EDBE2 KIT CÂNULA 150MM DE COMPRIMENTO, 18 GAUGE, 10 MM DE PONTA CURVA.

INDICAÇÃO DE USO:

A cânula descartável para bloqueio destina-se a auxiliar o cirurgião no bloqueio da dor no local desejado pelo profissional.
O objetivo do procedimento é o alívio temporário dos sintomas, embora, em alguns casos, esse alívio possa ser bastante duradouro.
O produto permite a realização de um procedimento minimamente invasivo com fácil manipulação das cânulas e segurança.
Produto destinado para punção única.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

As cânulas são produtos invasivos cirurgicamente de uso transitório (menos de 60 min).
É uma ferramenta para tratamento de nervos periféricos com a finalidade de bloquear a dor fornecendo preparação para o procedimento cirúrgico ou analgesia como tratamento da dor crônica. Este procedimento é realizado sem prejuízo às funções vitais do paciente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em embalagem original estéril, evitando impactos.
Conservar a temperatura entre -20°C e 60°C em local limpo e seco;
Manter a umidade entre 20% e 90%;
Proteger da incidência direta de raio solar.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:

Somente deverá ser utilizado por profissional médico devidamente habilitado e treinado para execução do procedimento.
Produto comercializado estéril. O produto não acompanha nenhum material implantável e nenhum medicamento ou fármaco.
Para o descarte correto do material, seguir o protocolo de descarte de resíduos sólidos implantado pelo hospital.
Descaracterizar o material antes de seu descarte.

REQUISITOS DE INFRA-ESTRUTURA:

Somente devem ser utilizadas em hospitais e clínicas em condições assépticas e manipuladas por médicos habilitados e treinados.

EndoDisc®

Fabricado por:

Renova Medical Indústria e Comércio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA


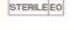




Rua Angela Berbel Pagano, 336 – Jd. Alvorada

E-mail: rt@renovamedical.com.br

CNPJ: 31.047.312/0001-84

Responsável Técnico: Nathalia Lopes Schiavotelo COREN-SP 566.914

Data: 25/06/2024 Versão 01

	Aviso: O uso e venda deste produto é restrito à profissionais da área médica
	Estéril; Método de esterilização: Óxido de etileno
	Uso único
	Aviso; Consulte instruções de uso
	Deixe fora da luz solar
	Não use se a embalagem estiver violada